

FOMENTEK - das Therapie-Wasserkissen

*...geniessen sie das schweben
und die wohltuende Wärme*



**Einfachste
Handhabung!**



Ein einfaches, sauberes und sicheres Hilfsmittel für die Wärme- und Kältetherapie. Ähnlich verwendbar wie Paraffin oder Fango, jedoch ohne die lästigen Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten. FOMENTEK Wasserkissen werden aus einem doppelwandigen, speziell für die Raumfahrt entwickelten Kunststoff hergestellt.

Die Wärme oder Kälte bleibt bis zu zwei Stunden gespeichert und damit therapeutisch einsatzbereit.

Heissanwendung Das FOMENTEK Wasserkissen kann direkt mit warmen Leitungswasser (empfohlen 38 - 40°C) gefüllt werden und ist auch als Wärmeträger für Wickel- und Kräuttherapie geeignet.

Kaltanwendung Einfach mit kaltem Leitungswasser auffüllen.

Kälte-/Eisanwendungen Füllen Sie das FOMENTEK mit 80 % Wasser und 20% medizinischem Alkohol und legen Sie das Wasserkissen für kurze Zeit in das Gefrierfach.

1 Jahr Garantie bei Beachtung der Gebrauchshinweise.

- passt sich sanft den Körperformen an
- wohltuend, sicher, sauber und günstig

FOMENTEK Minikissen

S 38 x 28 cm **2 Stück** CHF **34.00** inkl. MwSt.

FOMENTEK Wasserkissen mittel

M ca. 38 x 46 cm CHF **29.00** inkl. MwSt.

FOMENTEK Wasserkissen gross

L ca. 60 x 46 cm CHF **34.00** inkl. MwSt.



Optimaler, müheloser therapeutischer Zugang zu den Problemzonen.

Eröffnet neue Dimensionen der Manuellen Therapie/Körperarbeit:

Patientin in Rückenlage auf dem grossen FOMENTEK:

Der Therapeut gleitet an der Ecke in die sich bildende Tasche und gelangt so mühelos an jeden Bereich des Rückens (siehe Abb. unten).

Das Gewicht des Patienten wird vom verdrängten Wasser getragen und wie schwerelos gehoben.



Ähnlich verwendbar wie Paraffin oder Fango jedoch ohne die lästigen Vorbereitungs- und Reinigungsarbeiten.

Das dünnwandige Material passt sich geschmeidig an die Gliedmassen an.

Ab 5 Stück 10 % Mengenrabatt,
grössere Mengen auf Anfrage.
Händleranfragen erwünscht

Widerstandsfähig

FOMENTEK Wasserkissen werden aus einem doppelwandigen, speziell für die Raumfahrt entwickelten Kunststoff hergestellt. Obwohl weich und dehnfähig ist es sehr robust und ein gefülltes Kissen (ca. 1/3 Wasser) kann einem Druck bis zu 200 kg standhalten.

Massage- und ätherische Öle, Reinigungs- und Lösungsmittel greifen das Material nicht an und so ist das vielseitig verwendbare FOMENTEK überall, z.B. auch bei Hausbesuchen, Spitex, im Sport, auf Reisen und Wanderungen etc. in kürzester Zeit einsatzbereit.

