

Doppeldruckbetätigung zur Höhenverstellung

(für elektr. Behandlungsliegen LUNA, NEXX, STAN)

Neu schreibt das Medizinprodukte-Gesetz ab 2021 zum Schutz der Therapeutinnen, Therapeuten und deren Klienten für die Höhenverstellung von Behandlungsliegen eine Sicherheits-Doppeldruckfunktion vor.

Die Betätigung der Liege erfolgt mit einer **Doppeldruckbetätigung** (zusätzliche Freigabefunktion), um eine unbeabsichtigte Ingangsetzung zu verhindern.

Zur Höhenverstellung muss das Betätigungselement (Hand-, Fusschalter oder Rundumschaltung) für die gewünschte Bewegungsrichtung **2 x kurz hintereinander betätigt** werden.

Mit der 1. Betätigung/Drücken werden die Bedienelemente freigeschaltet.

Mit der 2. Betätigung erfolgt das Einschalten des Motors/Höhenverstellung.

Wird die Betätigung beendet, kann **innerhalb von 3 Sekunden eine Korrektur** der Höhenverstellung mit **nur einer Betätigung** erfolgen.

Bei einem Unterbruch von mehr als 3 Sekunden muss die Liege wieder mit einem Doppeldruck freigeschaltet werden.